

SWISS optio Entnahmestelle AGFS



Die Entnahmestelle AGFS auf einen Blick:

- Attraktives, funktionales Design
- Robuste Vollmetallausführung
- Servicefreundlich und langlebig
- Das Einsatzgebiet ist der Spital-, Klinik- und Rettungsbereich

Die **Entnahmestelle AGFS** (**An**ästhesie **Gas** **F**ortleitungs **S**ysteme) dient der sicheren Absaugung von überschüssigem Anästhesiegas.

Der Unterdruck (Vakuum), welches die **Entnahmestelle AGFS** zur Absaugung des überschüssigen und abgeatmeten Narkosegases benötigt, wird über einen integrierten und mit medizinischer Luft betriebenen Ejektor erzeugt. Die Absaugung erfolgt über einen Schlauch, der mit einem der Norm EN ISO 9170-2 entsprechenden Stecker (1L) in die **Entnahmestelle AGFS** eingekuppelt wird.

Durch das Einkuppeln des Schlauches wird die **Entnahmestelle AGFS** in Betrieb gesetzt. Eine optische Betriebsanzeige (grünes Aufleuchten) zeigt den Betrieb der **Entnahmestelle AGFS** an.


Die **Entnahmestelle AGFS** ist für Einbau in einen Medienkanal oder für Unterputzeinbau lieferbar. Durch ihre Ausführung in Vollmetall ist die **Entnahmestelle AGFS** sehr robust und entsprechend langlebig.

Die **Entnahmestelle AGFS** erfüllt die Anforderungen der Norm EN ISO 9170-2.
CE Kennzeichnung gemäss Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG.

Technische Daten :

Druckbereich für die Versorgung des Ejektors	max. 6 bar
Ausführungsvarianten	Medienkanalmontage / Deckenversorgungseinheit Unterputzmontage
Betriebsgas Ejektor	Air (medizinisch)
Abgesaugtes Medium	Anästhesiegas
Anschlüsse	Ableitung abgesaugtes Medium : Rohrende mit Aussendurchmesser 15 mm zum Anschluss mit einem flexiblen Schlauch an die Abluftleitung der Klinik Versorgung Ejektor : Pneumatischer Steckanschluss Ø4 mm für die Versorgungsluft des Ejektors
Material	Messing (sichtbare Aussenteile vernickelt), Kupfer, POM, EPDM, Hostaphan
Betriebstemperatur	-20° bis +60°C
Abmessungen	B x T x Durchmesser : 80 mm x 69.5 mm x Ø 48 mm (Sockelbaugruppe)
Gewicht	900 gr

Ausführungsvarianten GM31xx

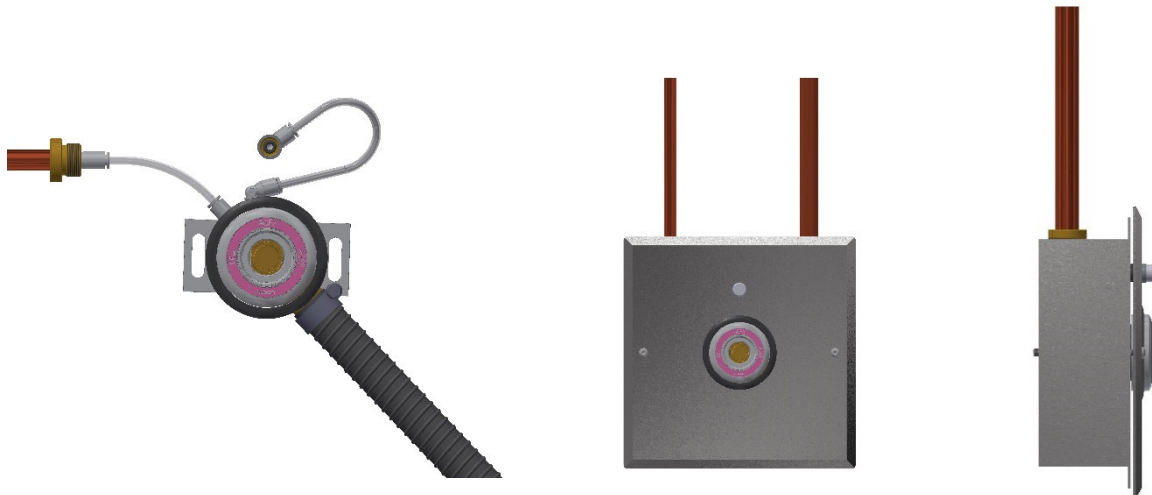

Notwendige Angaben bei Bestellung :

Ausführungsvariante Einbau in Medienkanal, Unterputzmontage

Lieferbares Zubehör :

Art. 661690 Winkelstecker AGFS 1 Liter Ø 22 mm

Änderungen vorbehalten. Alle Schutzmarken sind Eigentum der Gloor AG.

GLOOR

GLOOR AG
Kirchbergstrasse 111
3401 BURGDORF
SCHWEIZ

www.gloor.ch
gloor@gloor.ch
Tel.: +41 34 427 47 47
Fax.: +41 34 423 15 46